

TODA CORONADIAG[®]

Rychlý diagnostický test na virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) v plné krvi

TODA CORONADIAG[®] je imunochromatografický test na detekci viru SARS-CoV-2 (Coronavirus) ve vzorku krve.

PRAKTICKÝ

- Testy jsou dodávány v jednotlivých sadách pro optimální používání.
- Bezpečné lancety na jedno použití dodávané s testy.

SPOLEHLIVÝ

- Vysoká sensitivita a specificita:
 - Plná krev IgG: specificita 98 % - sensitivita 100 %
 - Plná krev IgM: specificita 96 % - sensitivita 85 %

SNADNÝ NA POUŽITÍ

- Výsledek obdržíte po 10 minutách od započetí testu.

SNADNÉ POUŽITÍ POUZE V 5 KROCÍCH

1. Otevřít lancetu, desinfikovat prst a propíchnout kůži lancetou.
2. Setřít první kapku krve a poté odebrat další kapku.
3. Kápnout 1 kapku krve do prohlubně S kazety.
4. Přidat 2 kapky činidla do prohlubně S kazety.
5. Počkat 10 minut a interpretovat výsledek.

JASNÁ INTERPRETACE (viz obrázek na originálním příbalovém letáčku dole)

Positivní

Positivní IgG – Objeví se dva barevné proužky: proužek v kontrolní zóně C a proužek v zóně IgG.

Positivní IgM – Objeví se dva barevné proužky: proužek v kontrolní zóně C a proužek v zóně IgM.

Positivní IgG a IgM – Objeví se tři barevné proužky: proužek v kontrolní zóně C, proužek v zóně IgG a proužek v zóně IgM.

Negativní

Negativní – Objeví se barevný proužek v kontrolní zóně C, ale žádný barevný proužek v zónách IgG nebo IgM.

Neplatný

Neplatný – V kontrolní zóně C se neobjeví žádný proužek (na výskytu proužků v zónách IgG a IgM přítomnost nezáleží).